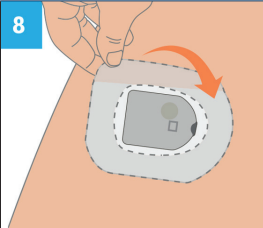
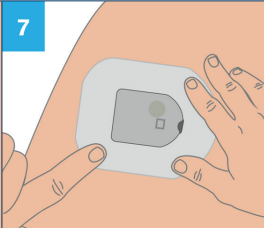
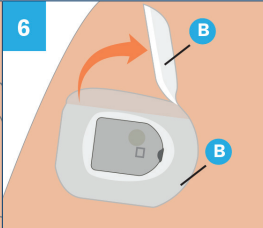
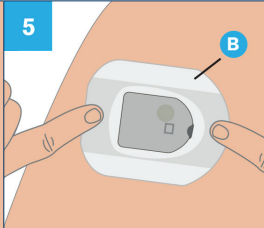
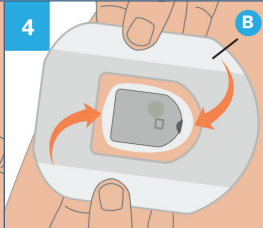
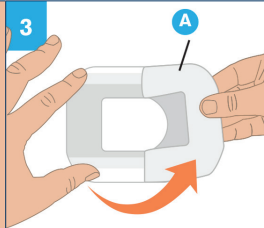
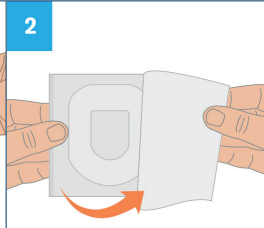
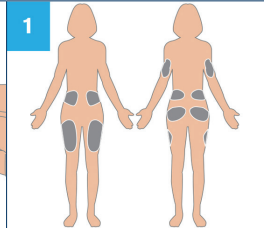


PodPals™ אביזר חיזוק לאומניפוד - מדריך למשתמש

							
<p>כשתהיו מוכנים להסיר את ה-PodPal™, קלפו בהירות את קצותיו והרימו אותו מן העור. הסירו תחילה את ה-PodPal™ ולאחר מכן את הפוד.</p>	<p>לחצו כלפי מטה בכל המקומות כדי לקבע את ה-PodPal™ לעור ולמטח הדביק של הפוד. הקפידו להחליק קמטים כלשהם.</p>	<p>קלפו בזהירות את גב הנייר (B) משני הצדדים.</p>	<p>בטרם תלחצו כלפי מטה כדי לקבע את ה-PodPal™, ודאו כי הוא מכסה את כל הקצוות של השכבה הדביקה של הפוד וכי אינו מכסה חלק כלשהו של הפוד - במיוחד את חלון הצפייה של הקנולה.</p>	<p>כשהצד הדביק מופנה כלפי מטה, הצמידו את ה-PodPal™ מעל הפוד. הימנעו ממגע עם השכבה הדביקה. במקום זאת, החזיקו באמצעות אחיזה בציפוי הנייר (B). אין למתוח את ה-PodPal™ לפני השימוש או במהלכו.</p>	<p>קלפו והסירו לגמרי את השכבה העליונה של גב הנייר (A).</p>	<p>פתחו את החפיסה באמצעות משיכת הלשוניות והפרדתן.</p>	<p>התחילו עם פוד פעיל במיקום מתאים.</p>

- אין להשתמש ב-PodPals אם החפיסה הסטרילית פתוחה או פגומה, שכן הדבר עלול להגדיל את הסיכון לזיהום.
- אין להשתמש ב-PodPals אם חלק תאריך התפוגה שמופיע על האריזה.
- ה-PodPals מיועד לשימוש חד פעמי. אין לעשות בו שימוש חוזר או להצמידו שוב.
- יש להקפיד על טיפול נאות בפוד וכן יש לבדוק את מקום העירוי של הפוד מדי יום, כדי לוודא כי הפוד והקנולה הרכה מקובעים היטב וכי הם נמצאים במקומם. היו מודעים לסימני זיהום, לרבות כאב, נפיחות, אדמומיות, הפרשות או חום במקום העירוי. אם אתם חושדים בזיהום, פעלו לפי הוראות השימוש של הפוד המתייחסות לזיהומים במקום העירוי.
- יש להקפיד על שיטות טיפול נאותות בסוכרת, לרבות ניטור רמות הסוכר בדם לפי הנחיות הרופא המטפל. ניטור תכופ מסייע במניעה של היפוגליקמיה או היפרגליקמיה שאינן מובחנות.
- יש להשליך את ה-PodPals בהתאם לתקנות המקומיות הנוגעות לסילוק פסולת.
- יש להרחיק את חומרי הפסולת מילדים קטנים כדי למנוע סכנת חנק.

הוראות

1. ודאו כי אזור השימוש נקי ויבש לחלוטין לפני השימוש. הימנעו משימוש בתחליב גוף, קרמים או שמנים שכן מוצרים אלה עלולים לרופף את החומר הדביק.
2. לחצו על ה-PodPal והחזיקו אותו לחוץ במשך 30 שניות בקירוב לאחר ההצמדה, כדי להבטיח הדבקה מיטבית.
3. לחצו והחליקו את השכבה העליונה כנדרש, כדי למנוע קמטים.
4. בעת שימוש ב-PodPal במקום שהגישה אליו מסובכת, ייתכן שיהיה צורך בעזרה.
5. לאחר שהושם, על ה-PodPal להישאר במקומו למשך כל חיי הפוד.

אזהרות

- אין להשתמש ב-PodPals לכל צורך אחר, למעט המטרה שלשמה נועדו.
- אין להשתמש ב-PodPals אם אתם רגישים לדבקים אקריליים או סובלים מאלרגיות לחומרים אלה, או שעורכם רגיש וניזוק בקלות.

												
<p>נציג מורשה בקהילייה האירופית</p>	<p>טמפרטורת אחסון טמפרטורת פעולה</p>	<p>אחסון בלחות יחסית תפעול בלחות יחסית</p>	<p>יש להקפיד על הוראות השימוש</p>	<p>שימוש חד פעמי בלבד</p>	<p>אין להשתמש אם האריזה פגומה</p>	<p>סימן תאימות</p>	<p>תאריך תפוגה</p>	<p>יצרן</p>	<p>תאריך הייצור</p>	<p>מספר סימוכין</p>	<p>מס' אצווה</p>	<p>חוטא באמצעות אטילן אוקסיד</p>

PodPals הם אבזרים שמיועדים להיות בשימוש כסיוע להתאמת אזורי ההצמדה לעור, אשר נמצאים מסביב לפוד בעת שימוש במוצרי Omnipod®. © 2020 Omnipod, Insulet Corporation. הולגו של Omnipod, הולגו של PodPals, והולגו של PodPals הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של חברת Insulet בארה"ב ותחומי השיפוט השונים. כל הזכויות שמורות.