

VIVI CAP1

By TempraMed



ATTENTION !

Place correct adaptor on Pen first, prior to inserting into VIVI CAP1

לשימת לבך !

יש להרכיב את המתאם המתאים על עט האינסולין תחילה ורק אחר כך להכניסו ל וויי קאפ1

انتباه !

ضع المحول الصحيح على القلم أولاً ، قبل إدخاله في VIVI CAP1



התאם את המתאם לעט לפי הסימון:



T

NovoNordisk

מתאים ל:

FlexTouch

שם התרופה:

Novorapid

Tresiba (Degludec)

Fiasp



K

Eli Lilly

מתאים ל:

KwikPen

שם התרופה:

Humalog

Humalog Mix | Humulin

Humulin Mix | Basaglar



F-S

NovoNordisk & Sanofi

מתאים ל:

FlexPen & SoloStar

שם התרופה:

NovoRapid | Novolog |

NovologMix | Victoza |

Levemir | Lantus | Apidra

VIVI CAP1

By TempraMed



Fig 2.

עבור עט "פלקסטאץ" בלבד:
אחרת דלג ל 3
ישר את החריץ במתאם לבליטה בעט.



Fig 1.

החלק את מתאם העט המתאים לגוף העט. צד המחט ראשון ואות המתאם פונה לכיוון צד המחט.



Fig 4.

אחוז בעט ביד אחת ובאצבעות ידך השנייה הטה קדימה ואחורה את לוחית האות עד לניתוקה



Fig 3.

החלק כלפי מעלה עד אשר הוא ינעל לגוף העט ב"קליק"



Fig 6.

הכנס פנימה לויי קאפ את העט עם המתאם עד לנעילה ב"קליק"
שים לב! לאחר נעילה לא ניתן להוציא את המתאם



Fig 5.

ישר את החריץ על המתאם עם המסילה בחלקו העליון של ווי קאפו