

להיות Podder™

בשלושה
צעדים פשוטים.



מערכת לניהול אינסולין

לקוחות חדשים של אומניפוד, בבקשה השלימו את תהליך הגדרת המערכת עם הצוות הרפואי.

1 הגדר את ה-PDM שלך

הגדר את מנהל הסוכרת האישי שלך (PDM) בעזרת אשף ההגדרות של מערכת ה-Omnipod®.

לצורך כך, עליך להצטייד בשעון מדויק (שעון היד שלך, שעון מעורר או טלפון סלולרי). כמו כן, תצטרך גם את ההגדרות האישיות שלך על מנת להכניס ל-PDM החדש.

+ אם אתה כבר משתמש במערכת ה-Omnipod®, תוכל לשלוף את ההגדרות הללו מתוך ה-PDM הנוכחי שלך.

+ אם אתה משתמש חדש של מערכת ה-Omnipod®, עליך להשלים את תהליך ההגדרה בעזרת צוות רפואי או המדריך שלך למערכת ה-Omnipod®.



1 הכנס את סוללות ה-AAA הכלולות בערכת ה-PDM לתא הסוללות בצדו האחורי של ה-PDM שלך.



2 אשף ההתקנה מופיע בפעם הראשונה שתדליק את ה-PDM שלך. האשף ידריך אותך בכל שלבי תהליך ההתקנה. עקוב אחר ההנחיות בכל מסך כדי להגדיר:

+ שם הזיהוי שלך - השם שבו תשתמש על מנת לזהות את ה-PDM שלך

+ צבע מסך הזיהוי שלך - ניתן לבחור מבין הצבעים לבן, ירוק, כחול, כתום או סגול

+ תאריך ושעה עדכניים

+ קצב בזאלי מקסימלי

+ קצב בזאלי התחלתי ו/או תוכנית בזאלית

+ שימוש בבזאלי זמני

+ צליל עבור בדיקת סוכר בדם (BG sound) והגדרת טווח היעד

של רמות הסוכר בדם (BG goal)

+ הגדרת מחשבון הבולוס בהסתמך על ערכי יעד,

יחסים ופקטורים (אם ניתן)

+ מקטע בולוס

+ בולוס מקסימלי

+ שימוש בבולוס מוארך

+ התראת מאגר אינסולין נמוך

+ התראת תפוגת פוד

כיצד לנווט באשף ההגדרות

+ השתמש בלחצני מעלה/מטה במנהל הסוכרת האישי שלך (PDM) על מנת להגדיל או להקטין מספר או לנוע כלפי מעלה/מטה ברשימה.

+ לחץ על תוויות מקשי הפעולה **Next** (הבא), **Select** (בחר), **Confirm** (אשר), **Save** (שמור) או **Done** (סיום) על מנת להמשיך למסך הבא.

+ לחץ על תוויות מקשי הפעולה **Back** (חזרה) או **Cancel** (בטל) על מנת לחזור למסך הקודם.

תוויות מקשי הפעולה מופיעות על המסך ישירות מעל לחצני מקשי הפעולה.



המסכים לעיל מייצגים מדגם קטן של הפונקציות הללו. המסכים בפועל עשויים להשתנות בהתאם להגדרת המשתמש.

הכנס את הגדרותיך בזהירות

חשוב מאוד להכניס את ההגדרות שלך בצורה מדויקת ל-PDM החדש שלך. עקוב בזהירות אחר ההוראות של מדריך זה להתחלה מהירה. למידע נוסף, פנה למדריך למשתמש המלא של מערכת ה-Omnipod®.

אם יש לך שאלות נוספות בנושא הגדרת ה-PDM שלך, צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו (24 שעות / 7 ימים) בשעות הפעילות בטלפון *6364 ומחוץ לשעות פעילות המשרד ניתן לפנות למוקד חירום בטלפון 03-6900317 שעות פעילות: ימים א'-ה' - 8:30 עד 18:00 יום ו' - 8:30 עד 12:15

מרכז הידע וההדרכה, כתובת: הרצל רוזנבלום 6, מתחם סי אנד סאן, תל אביב. אתר: www.geffenmedical.co.il

אם יש לך שאלות לגבי הגדרות המשאבה האישיות שלך, צור קשר עם איש הצוות הרפואי המטפל בך.



מדריך למשתמש

3 ימים



כאשר תסיים את הגדרות ה-PDM הוא ישאל האם ברצונך להפעיל פוד. עקוב אחרי הוראות ה-PDM להפעלת פוד חדש.

1 הכן את הפריטים הבאים:

+ PDM + פוד סגור + מגבוני אלכוהול + בקבוקון אינסולין מהיר פעולה U-100 בטמפרטורת החדר



2 שטוף את ידיך בסבון ומים.

נקה את חלקו העליון של בקבוקון האינסולין עם מגבון אלכוהול.

3 הוצא את המחט והמזרק מאריזת הפוד. הברג את המחט לקצה המזרק נגד כיוון השעון. אין להשתמש בסוג אחר של מחט או התקן מילוי מלבד מזרקי המילוי המצורפים לכל פוד.



4 הסר את מכסה המגן מהמחט. שאב אוויר לתוך מזרק המילוי, בכמות השווה לכמות האינסולין הנקובה בה תשתמש. עליך למלא לפחות 85 יח' אינסולין. הכנס את המחט לבקבוקון האינסולין והכנס אוויר.



5 הפוך את הבקבוקון כלפי מטה ולאט לאט שאב אינסולין מתוכו. הכה בעדינות בגוף המזרק על מנת להוציא את הבעות.



6 הוצא את המחט מהבקבוקון והכנס אותה לתוך פתח המילוי של הפוד. חץ על הנייר הלבן שבגב הפוד מצביע על פתח המילוי. אין להזיק את האינסולין למקום אחר על גבי הפוד. בזמן המילוי באינסולין השאר את הפוד באריזה השקופה.

⚠ כדי להבטיח מילוי נכון, אין להחדיר את מזרק המילוי לתוך פתח המילוי בזווית.


7 הזרק אינסולין לתוך פתח המילוי. הפוד ישמיע שני צפצופים. הוצא את המחט מפתח המילוי האינסולין. חזור את מכסה מגן המחט והסר את המחט ממזרק המילוי.



⊘ לעולם אין להזיק אוויר לתוך פתח המילוי בפוד. הדבר עלול לגרום למתן בשוגג של אינסולין או להפרעה באספקת האינסולין.

⊘ לעולם אין להשתמש בפוד אם חשת התנגדות בעת לחיצה על הבוכנה. מצב זה עלול לגרום להפרעה במתן האינסולין.

8 השאר את הפוד במגש הפלסטיק שלו מצידו הימני וצמוד ל-PDM כדי להבטיח תקשורת תקינה. לחץ Next (הבא) ב-PDM. המערכת מבצעת סדרת בדיקות בטיחות ומכינה את הפוד לפעולה באופן אוטומטי.

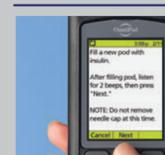

עקוב אחר ההוראות ב-PDM להתחלת מתן אינסולין.

1 סקור את עלון מיקום הפוד או את המדריך למשתמש של האוניפוד על מנת להחליט היכן למקם את הפוד שלך. שטוף את ידיך בסבון ומים. השתמש במגבון אלכוהול לניקוי האזור. אפשר לאזור להתייבש באוויר לחלוטין. אין לנשוף על האזור כדי לייבשו.



2 הסר את מכסה המחט של הפוד בצידו האחורי של הפוד כאשר ה-PDM מורה לך. משוך בחוזקה כלפי מעלה בקצה הפוד.




3 הסר בזהירות את גב הנייר הלבן ממדבקת הפוד. במקרה שהפוד רטוב או מלוכלך או המדבקה מקופלת, לחץ Discard (השלך) ב-PDM והתחל מהתחלה עם פוד חדש.



4 הצמד את הפוד אל מקום החיבור הנבחר לאחר שוודאת שהפוד תקין. העבר את אצבעך סביב המדבקה כדי להצמיד אותה. לחץ על Next (הבא) ב-PDM.



5 לחץ על Start (התחל) ב-PDM. המחט מוחדרת על מנת למקם את הקנולה מתחת לעור. תשמע "קליק" ותחוש צביטה קלה.

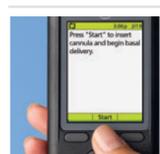

6 הבט דרך חלונת הצפייה של הפוד על מנת לבדוק את הקנולה. בדוק את אזור ההחדרה לוודא שהקנולה הוחדרה כראוי.

7 בדוק את פני השטח של הפוד; כעת תוכל לראות את הסמן הורוד בחלונת שבחלקו העליון של הפוד. אם הקנולה לא הוחדרה כראוי לחץ NO (לא) ב-PDM. לחץ Discard (בטל) להפסקת פעילות הפוד והתחל את התהליך עם פוד חדש. אם הקנולה מוחדרת כראוי לחץ YES (כן) ב-PDM.



8 בדוק את רמות הסוכר כ-1.5 שעות לאחר אתחול הפוד. ה-PDM יציג לך תזכורת לעשות את זה. הוא גם יזכיר לך לבדוק את אזור ההחדרה על מנת לוודא החדרה ראויה של הקנולה. לאחר שתסיים את הבדיקות האלו, לחץ OK ב-PDM.

⚠ לפני שתמשיך עם מערכת אומניפוד, התייחס למדריך למשתמש להוראות הפעלה מפורטות.



מדריך מקוצר למשתמש

מערכת לניהול אינסולין

