

שם המטופל: _____

תאריך לידה: _____ התחלת אינסולין: כן לא

משפחת המוצרים: _____ מותג החיישן: Dexcom FreeStyle Libre

תאריך ההדרכה: _____ | פורמט ההדרכה: פונטלי וירטואלית

שם איש מקצוע רפואי שנוכח (אם נוכח): _____

שימוש מחוץ להתוויה (אם יש שימוש מחוץ להתוויה, יש לוודא שהמשתמש מודע לכך): בהתוויה (On) מחוץ להתוויה (Off)

פרטי שימוש מחוץ להתוויה: _____

מבוא לטיפול עם משאבה

נושאי לימוד של סוכרת שסוקרו:

בדיקת סוכר בדם (BG)

טיפול בהיפוגליקמיה והיפרגליקמיה

ספירת פחמימות

מושגי טיפול במשאבה שסוקרו:

בזאלי/ בולוס, אינסולין פעיל בגוף (IOB), יחס אינסולין/פחמימה (IC), פקטור תיקון, פעולת אינסולין

סקירה כללית על המערכת

הנחיות אחסון ונסיעה והנחיות דיאגנוסטיות, מידע בנוגע לעמידות בפני מים

הדרכת Pod

תהליך התקשורת ומרחקים:

מיקום ה-Pod, אתר ה-Pod וטיפול בעור ומתי להחליף Pod

קוראיי (Omnipod 5):

מיקום ה-Pod, מיקום החיישן, המרחק המתאים בין ה-Pod לחיישן, מיקום ה-Pod לאחר ההדרכה

הכנת ה-Pod והפעלתו

אינסולין תואם בטמפרטורת החדר, מילוי מזרק - כמויות מינימום/מקסימום, אין למלא את ה-Pod מראש, בחירת אתר / רוטציה והכנה

החדרה אוטומטית של קנולה - בדיקת אתר העירוי / חלון צפייה וחיווי החדרה ורוד

פעולת מסך הבית

ניווט ביחידת השליטה של מערכת Omnipod - מסך זיהוי, מצב סוללה, כמות אינסולין שנותרה, שעה / תאריך, סוכר בדם (BG) אחרון / בולוס אחרון, קצב בזאלי נוכחי, פקיעת תוקף ה-Pod, IOB, ערך ומגמת החיישן (Omnipod 5 בלבד)

תכונות מערכת נוספות

קצב בזאלי זמני והגדרות מראש של בזאלי זמני

תוכניות בזאליות נוספות

הגדרות קבועות מראש - בזאלי זמני / בולוס קבוע מראש

מצבי מערכת (Omnipod 5 בלבד)

תכונת פעילות (Omnipod 5 בלבד)

ערכת שליטה מסופקת (PDM עבור DASH או בקר Omnipod 5)

הגדרות בסיסיות:

נעילת מסך מותאמת אישית, שעה, אזור זמן, תאריך, פורמט תאריך

סוללה, פריסת כפתורים, ניווט בסיסי, הפעלה, כיבוי, עוצמות קול

הגדרות בזאליות:

בזאלי מקסימלי, קצבים בזאליים, בזאלי זמני

הגדרות בולוס:

יעד רמת סוכר ורמת הסוכר שמעליה נדרש תיקון, יחס אינסולין לפחמימה (IC), פקטור תיקון, רמת סוכר בדם מינימלית לחישובים, תיקון הפוך, משך פעולת האינסולין, בולוס מוארך, בולוס מקסימלי

הגדרת החיישן (Omnipod 5 בלבד)

פתרון בעיות

היפוגליקמיה

ניהול ימי מחלה

היפרגליקמיה וקטונים

- המשתמש הופנה לסעיפי ההתראות במדריך למשתמש ובמדריך הטכני למשתמש (לעיון)
- תזכורות מותאמות אישית
- התראות ייעוץ

התראות סכנה:

- המדריך ליהד את המשתמש על התראות סכנה חשובות וכיצד להתמודד איתן.

התראות 5 Omnipod:

- מצב אוטומטי: מוגבל; התראת הגבלת הזלפה אוטומטית, התראות קשורות לחיישן (אם רלוונטי)

- השגחה/חידוש הזלפת אינסולין, היסטוריה, מזונות מותאמים אישית, תוכניות בזאליות, קצב בזאלי זמני/הגדרות קבועות מראש, תזכורות, הגדרות, החלפת מצבים ומידע על חיישן (5 Omnipod בלבד)

- חישובי בולוס, בולוס ידני, בולוס תיקון, בולוס ארוחות, התחלת/ביטול בולוס, הדגמת תכונת בטיחות של בולוס מקסימלי, שימוש בערך הנוכחי ובמגמת החיישן (5 Omnipod בלבד)

הצלחה רציפה

- שירות לקוחות 24/7 Omnipod
- תהליך אספקה
- סקירת המדריך למשתמש המצורף
- סקירת המדריך הטכני למשתמש המקוון
- מערכת ניהול נתונים
- ספקו ללקוח חומרי עזר שימושיים
- סקירה של תנאי האחריות והגבלת סעדים

הערות:

שם המדריך: _____ תאריך: _____

חתימת המדריך: _____ חתימת המטופל / אפוסרופוס: _____ תאריך: _____